

SONICflex® seal – Spitze nach Dr. Laurisch

Problembeschreibung:

- erhöhter Verlust von gesunder Zahnschubstanz bei Aufziehen der Fissur mit rotierendem Instrumentarium
- zu große Kavitätenbildung bei diagnostischer Präparation mittels rotierendem Instrumentarium


Problemlösung:

Sonoabrasive Airscaler-Spitze SONICflex® seal Nr. 45



- zur minimalinvasiven Erweiterung der Fissur vor der Versiegelung
- zum selektiven Entfernen von Karies

Klinische Anwendung:

- Führung der Spitze entlang der Fissur unter leichtem Druck ermöglicht deren extrem schonende Erweiterung
- Ansetzen der Spitze bei „Zweifelfällen“ in der Kariesdiagnostik garantiert gezielte, punktuelle diagnostische Präparation

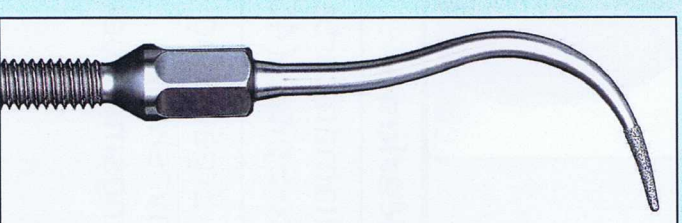

SONICflex® seal – Spitze nach Dr. Laurisch

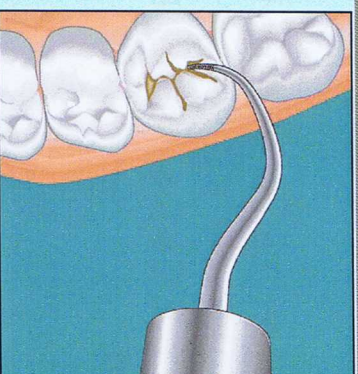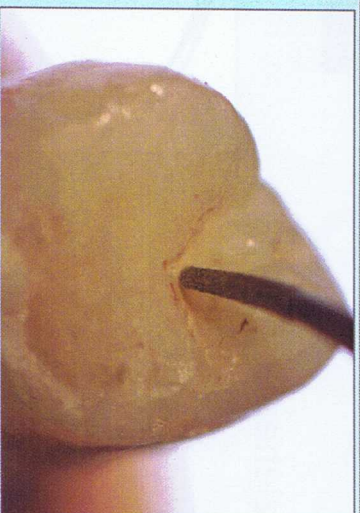

Merkmal	Vorteil	Nutzen
Grazile, diamantierte SONICflex-Spitze (46µ)	Minimalinvasive Präparation im Fissurenbereich	Maximale Schonung der Zahnhartsubstanz
Sinnvolle Ergänzung bei minimalinvasiven Behandlungsmethoden	Kontinuierliche Umsetzung moderner Methoden insbesondere bei: - DIAGNodent-Anwendern - Kinderzahnärzten	Langfristige Patientenbindung durch Zufriedenheit

